



## Выбор модели

Полуфабрикаты для изготовления индивидуальных ортезов стопы Формтотикс™ выпускаются в нескольких моделях.

Модели представлены в нескольких вариантах жесткости, каждому из которых соответствует определенный цвет.

Модификации серии, представленные ниже, расположены в порядке увеличения плотности (упругости) материала заготовки:

□ **Бежевые** — самые «мягкие» однослойные ортезы Формтотикс™; предназначены для обеспечения повышенной мягкости и бережного отношения к тканям стопы. Лучше всего подходят пожилым пациентам, стопы которых особенно уязвимы и чувствительны к перегрузкам. Назначаются также при выраженном болевом синдроме, артрите, диабете и других заболеваниях, связанных с патологическими изменениями в тканях стопы.

□ **Розовые** — однослойные ортезы. Обеспечивают хорошую амортизацию и чувство комфорта; вместе с тем они чуть более жёсткие, чем бежевые. Подходят для активных пожилых людей, а также для тех, чья трудовая деятельность связана со «стоячей» работой. Кроме того, они могут назначаться при транзиторном болевом синдроме стопы, артрите, диабете, подагре и других состояниях, сопровождающихся болями в стопе и ногах.

□ **Песочно-чёрные («Шокстоп»)** — двухслойные ортезы. Верхний слой состоит из уникального материала песочного цвета, который по упругости не знает мировых аналогов. Он необычайно эффективно поглощает ударные воздействия на стопу и разгружает локальные зоны перегрузки. Нижний, черный, формообразующий слой создает надежную опору и контролирует движения стопы. Ортезы «Формтотикс Шокстоп» назначаются при подагре, диабете, липоатрофии подошвы, артрите, пяточной «шпоре» и т.п. Они также подходят спортсменам, которым требуется поглощение значительных ударных нагрузок.

□ **Красно-голубые** — двухслойные ортезы, состоящие из мягкого покровного материала красного цвета и более плотного формообразующего голубого основания. Отличаются высокими амортизационными качествами и комфортом. Функционально сочетают надежную опору и эффективное управление движением. Эта модель подходит для многих пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата, связанными с перегрузками, а также спортсменам в различных видах спорта (бег, ходьба, игровые виды и т.п.).

□ **Голубые** — однослойные ортезы. Обеспечивают стопе упругую поддержку и контроль движений и, вместе с тем, также достаточно удобны и комфортны. Назначаются людям с повышенной двигательной активностью. Эти ортезы достаточно тонкие и легко размещаются в большинстве моделей повседневной обуви.

□ **Чёрно-бежевые** — двухслойные ортезы, состоящие из мягкого покровного материала бежевого цвета и более плотного формообразующего чёрного основания. Отличаются высокими амортизационными качествами и комфортом. Функционально сочетают надежную опору и эффективное управление движением. Эта модель подходит для многих пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата. Традиционный для обуви цвет. Модель с перфорацией.

□ **Чёрные** — однослойные ортезы. Обеспечивают стопе упругую поддержку и контроль движений. Назначаются людям с повышенной двигательной активностью. Эти ортезы достаточно тонкие и легко размещаются в большинстве моделей повседневной обуви. Плотность материала черных ортезов выше, чем у голубых аналогов, но ниже, чем у красных. Традиционный для обуви цвет.

□ **Низкопрофильные зелёные** — однослойные ортезы, с зауженной носочной частью и сниженной толщиной супинатора. Благодаря своей особенной форме данный вариант легко размещается в модели обуви пониженной полноты и используется как профилактическое средство при повседневном использовании. Модель с перфорацией.

□ **Golf Pro зелёные** — двухслойные ортезы мягким покровным слоем зеленого цвета и темно-зеленым упругим основанием, обеспечивающим заметный контроль движений. Модель с перфорацией.

**Красно-красные** — двухслойные ортезы, состоящие из мягкого верхнего покровного слоя красного цвета и упругого нижнего основания красного цвета. По сравнению с красно-голубыми аналогами, эти ортезы эффективнее контролируют движения, сохраняя при этом ощущения комфорта. Назначаются пациентам с повышенной двигательной активностью и/или большим весом (более 80-ти кг), а также — в качестве средства профилактики — спортсменам с интенсивными нагрузками на ноги (например, теннисистам).

□ **Красные** — однослойные, упругие (наиболее жесткие) ортезы для контроля движений стопы. Их назначают, когда необходим повышенный контроль движений стопы/нижней конечности.

□ **Формтотикс ¾ Комфорт чёрные** — относительно мягкие ортезы; изготавливаются для узких, узких туфель-«лодочек». Они удобны и комфортны и служат достаточной опорой для стопы.

□ **Формтотикс ¾ Комфорт красные** — более плотные и упругие, чем их черные аналоги. Обеспечивают больший контроль движений.

□ **Джуниор ¾ Формтотикс™ синие** — специальная ортопедическая полустелька для детей. Обеспечивает осторожную щадящую поддержку, удобную и, вместе с тем, естественную. Они используются для коррекции чрезмерной пронации стопы (вальгусной позиции пяток), а также в периоды скачков роста, прибавки веса, повышенной физической активности и в других подобных случаях, при которых стопа ребёнка нуждается в помощи.

**Ортопедические вкладыши-супинаторы** можно разделить на два вида:

**1.** Короткие и длинные клинья, закруглённые с одной стороны.

В процессе применения клинья прикрепляются в различных местах и в различном объёме к сформованным заготовкам Формтотикс.

**2.** Каплевидные метатарзальные подушечки для коррекции переднего отдела стопы.

Отрывное самоклеящееся основание-стикер позволяет оперативно поместить вкладыш в желаемое место.

Вкладыши позволяют корригировать форму сформованных ортезов и помогают достичь наилучшего терапевтического эффекта, улучшить функциональные и биомеханические параметры опорно-двигательного аппарата.

Эффективность коррекции зависит как от квалификации врача, так и от заболевания пациента.

Отрывное самоклеящееся основание-стикер позволяет оперативно поместить вкладыш в желаемое место.

*Примечание:*

— клинья к стелькам универсальные

— метатарзальные подушечки поставляются в размерах:

№ 1 — к размерам XS, S; № 2 — к размерам от M до XXL.

**Соответствие полуфабрикатов Формтотикс™ традиционным размерам обуви.**

Размер обуви:	31-34	35-37	38-41	41-43	44-45	45-47	47-50
Размер заготовки:	<b>KIDS</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>

